



NÁVOD K POUŽITÍ SEDAČKY POD SPRCHU

JINNY
LILLY
JILL
MELBOURNE
SIDNEY

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Sedačky pod sprchu tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardně vybavenou sprchu. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

Typ LILLY: Rám sedačky, který je vyroben z vylehčených duralových trubek, je doplněn plastovým hygienickým sedátkem a plastovou opěrkou zad. Opěrné nohy, které umožňují výškové nastavení sedačky v pěti polohách, jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci. Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí stlačením aretační pojistky opěrné nohy ve dvou bodech proti sobě. Po následném nastavení nově zvolené polohy (vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy) a uvolnění aretační pojistky, tato pojistka samočinně zajistí opěrnou nohu ve zvolené poloze .

Typ JILL: Tento model je v základním provedení dodáván bez plastové opěrky zad, jinak je shodný s typem LILLY.

Typ MELBOURNE: Vychází z modelu LILLY a má navíc hygienický výřez v sedátku.

Typ SIDNEY: Vychází z modelu JILL a má navíc hygienický výřez v sedátku.

Typ JINNY: Pevný rám sedačky je vyroben z povrchově upravených duralových trubek. Opěrné nohy jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci. Má kulaté pevné sedátko s průměrem 33 cm.

ÚDRŽBA: Sedačku lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte.



VAROVÁNÍ: Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jistících prvků!
Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s madlem viz. katalog VERMEIREN ČR s.r.o.

ZÁRUKA: Vermeiren Polska odpovídá za případné vady materiálu nebo technologické chyby vzniklé při výrobě po stanovenou dobu, počítanou ode dne prodeje.

Záruční doba je pro každý výrobek uvedena v záručním listu.

Záruční podmínky budou zachovány pokud naše výrobky budou používány v souladu s uvedenými zásadami a v souladu se svým určením.

Záruka se nevztahuje na:

- náklady dopravy, obsluhy a jiné nároky,
- poškození vzniklé z konstrukčních změn provedených uživatelem,
- prvky podléhající přirozenému opotřebení a oděru,
- škody, které způsobil uživatel prostřednictvím výrobku,
- škody vzniklé v důsledku jiných vnějších činitelů,
- škody vzniklé v důsledku toho, že nebyly použity originální náhradní díly.

Veškeré záležitosti související se zárukou na náš výrobek, vyřizujte v místech prodeje výrobku nebo s našimi distributory.

VÝROBCE:

VERMEIREN Polska Sp. z o.o.

Ul. łączna 1

55-100 Trzebnica

Tel. 071/387-42-00

Fax 071/387-05-74

e-mail: info@vermeiren.pl

www.vermeiren.pl

ZASTOUPENÍ:

VERMEIREN ČR s.r.o.

Nádražní 1387/132

702 00 Ostrava 1

e-mail: info@vermeiren.cz

www.vermeiren.cz